

KAL-ST1-LIGHT Instrukcja obsługi v1/11.2024

Nadajnik przywołania ze zdalnym włącznikiem światła



Opis

Nadajnik ten jest zazwyczaj montowany przy łóżkach lub w toaletach. Umożliwia wezwanie pomocy poprzez naciśnięcie przycisku SOS lub przycisku na kablu. Dzięki charakterystycznemu czerwonemu kolorowi i czytelnemu piktogramowi obsługa nadajnika jest intuicyjna. W tej samej obudowie znajduje się również przycisk do anulowania wywołania. Model KAL-ST1-LIGHT jest wodoodporny i posiada klasę szczelności IP56. Dodatkowo model ten pozwala na zdalne sterowanie przekaźnikiem – oświetleniem.

Parametry techniczne

- Typ baterii: A23
- Napięcie: DC 12 [V]
- Natężenie: < 35 [mA]
- Zasięg w przestrzeni otwartej: ≤ 500 [m]
- Częstotliwość transmisji: 433 [MHz]
- Moc wyjściowa: < 100 [mW]
- Materiał: ABS
- Klasa szczelności: IP56
- Wymiary przycisku: $106 \times 86 \times 17$ [mm]
- Długość kabla: < 2 m
- Zasilanie modułu przekaźnika: WE 230 V AC; WY 230 V AC
- Obciążalność przekaźnika: maks. 250 V AC / 10 A
- Wymiary przycisku na kablu: $95 \times 50 \times 20$ [mm]





UWAGA

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia. Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją. Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji. Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów – pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą, lub zniszczeniem.

Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Do instalacji urządzenia mogą przystępować wyłącznie osoby, które mają odpowiednią wiedzę techniczną i doświadczenie.



Zagrożenia dla użytkownika

- Wszystkie zalecenia dotyczące instalacji i korzystania z urządzenia zawarte w tej instrukcji powinny być zgodne z lokalnymi normami bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.
- Urządzenie musi być uziemione w celu zmniejszenia zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
- Producent nie przyjmuje zobowiązań oraz nie ponosi odpowiedzialności za pożary lub porażenie prądem spowodowane nieodpowiednią instalacją, lub obsługą urządzenia.
- Urządzenie można używać wyłącznie po przeczytaniu i zrozumieniu niniejszej instrukcji obsługi.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować. Instrukcja obsługi musi być dostępna dla wszystkich użytkowników. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek.
- Urządzenie przewidziane jest do celu opisanego w niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenia nie mogą używać dzieci. Nie jest ono przeznaczone do zabawy.
- Nie podłączać urządzenia do zasilania przed zakończeniem montażu.



Zagrożenia dla urządzenia

- Wszelkie naprawy i przeglądy urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów pomocy technicznej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieuprawnionych modyfikacji lub prób naprawy urządzenia.
- Podczas przewożenia, przechowywania i instalacji urządzenia, należy chronić je przed dużym naprężeniem, gwałtownymi drganiami lub rozpryskiwaną wodą.
- Nie narażać urządzenia na wstrząsy mechaniczne.
- Należy unikać kapania płynów na urządzenie, upewnić się, że na urządzeniu nie znajdują się zbiorniki wypełnione płynem, i zapobiec wyciekom płynu.
- Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, o ile nie jest do tego przystosowane.
- Prosimy o nieinstalowanie urządzenia w miejscu zakurzonym lub zadymionym.



- Prosimy o instalację urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu, nie wolno blokować otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. W przeciwnym razie następuje utrata gwarancji.
- Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne pracujące na wysokich częstotliwościach mogą zakłócać działanie urządzenia.
- Prosimy o transport, użytkowanie i konserwację urządzenia przy dozwolonych warunkach wilgotności i temperatury.
- Prosimy nie demontować obudowy podczas pracy urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.



Wskazówki dotyczące postępowania z bateriami

- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć dane miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia! Małe dzieci mogłyby połknąć baterie i się nimi udusić. Dlatego baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Należy zwrócić uwagę na znak polaryzacji plus (+) i minus (-).
- Jeśli z baterii wyciekł elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i wyczyścić przegrodę na baterie suchą szmatką.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem wysokiej temperatury.
- Zagrożenie wybuchem! Nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie wolno ładować ani zwierać baterii.
- W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas wyjąć baterie z przegrody.
- Należy używać tylko tego samego lub równoważnego typu baterii.
- Zawsze należy wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
- Nie należy używać akumulatorów!
- Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać baterii.



Utylizacja

- Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE.
- W celu uniknięcia ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów należy go przekazać do recyklingu, propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
- Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.



Spis treści



1. Dane techniczne.....	4
2. Wymiana baterii w przycisku przywołania.....	4
3. Montaż przycisku przywołania.....	5
4. Obsługa przycisku przywołania.....	6

1. Dane techniczne


- Typ baterii: A23
- Napięcie: DC 12 [V]
- Natężenie: < 35 [mA]
- Zasięg w przestrzeni otwartej: ≤ 500 [m]
- Częstotliwość transmisji: 433 [MHz]
- Moc wyjściowa: < 100 [mW]
- Materiał: ABS
- Klasa szczelności: IP56
- Wymiary przycisku: $106 \times 86 \times 17$ [mm]
- Długość kabla: < 2 m
- Zasilanie modułu przekaźnika: WE 230 V AC; WY 230 V AC
- Obciążalność przekaźnika: maks. 250 V AC / 10 A
- Wymiary przycisku na kablu: $95 \times 50 \times 20$ [mm]

2. Wymiana baterii w przycisku przywołania

- 1) Delikatnie podważ dolną pokrywę baterii płaskim śrubokrętem w małej szczelinie od dołu przycisku.

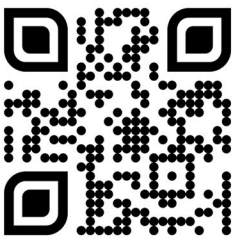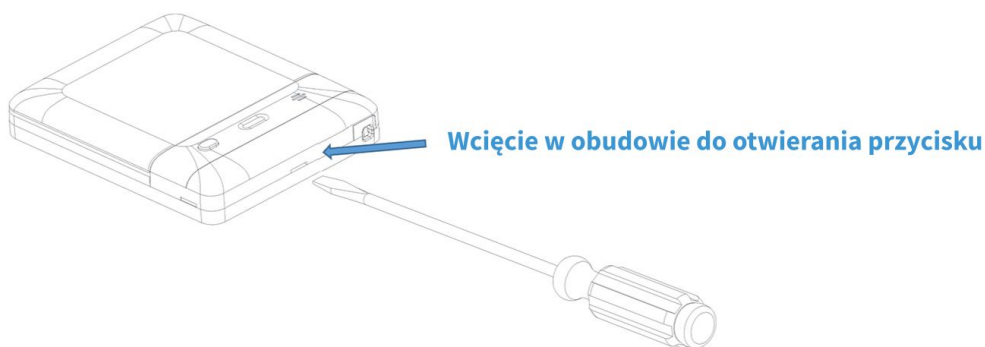

- 2) Następnie płaskim śrubokrętem podważ dolną pokrywę od pozostałych stron.

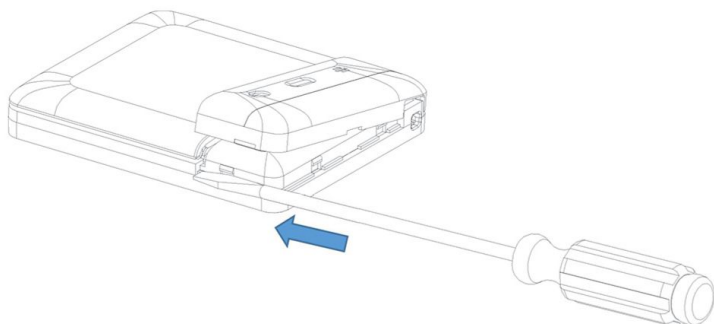


UWAGA

Przed pierwszym użyciem przycisku należy otworzyć przycisk i wyjąć zabezpieczenie baterii!


3. Montaż przycisku przywołania

- 1) Delikatnie podważ czerwoną pokrywę przycisku płaskim śrubokrętem jak na zdjęciu.

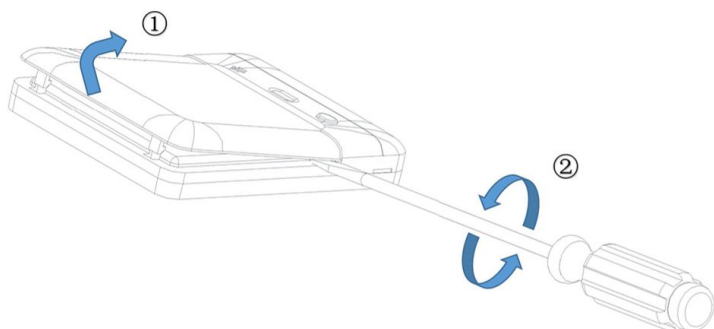

- 2) Przymocuj przycisk wywołania do ściany za pomocą dwóch śrub i/lub taśmy dwustronnej do sztywnego podłoża.



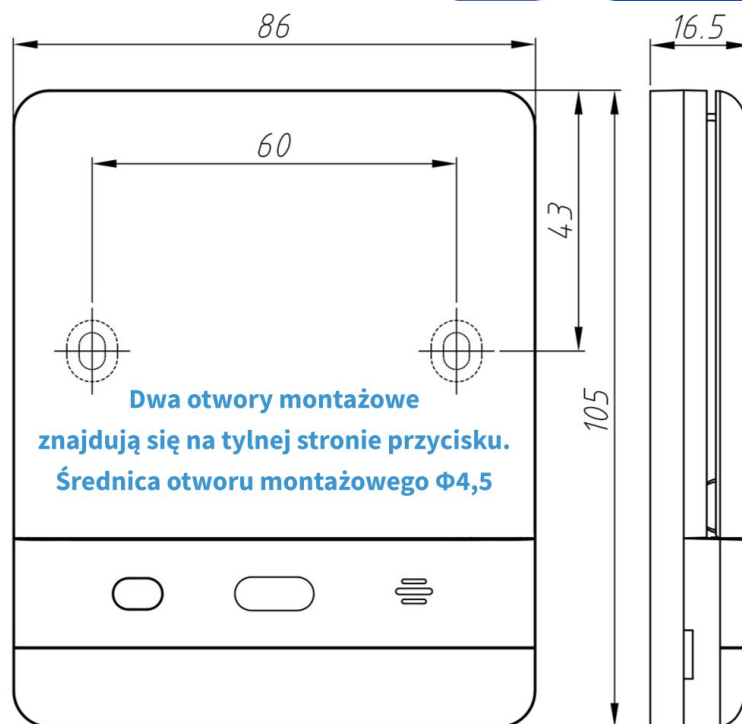

- 3) Po przykręceniu przycisku do sztywnego podłoża należy ponownie założyć czerwoną pokrywę przycisku.

4. Obsługa przycisku przywołania

Naciśnij czerwony przycisk SOS przywołania, zapali się czerwona dioda potwierdzająca wystanie wezwania przez przycisk.

Naciśnij czerwony przycisk na kablu, zapali się czerwona dioda potwierdzająca wystanie wezwania przez przycisk.

Naciśnij żółty przycisk na kablu z ikoną żarówki, żeby włączyć przekaźnik w module zdalnego sterowania – zapalenie/zgaszenie światła.

Naciśnij zielony przycisk Kasuj, aby odwołać przywołanie, również zapali się czerwona dioda potwierdzająca wystanie odwołania.

© 2024 Kaler®. Wszystkie prawa zastrzeżone.
ul. Chopina 37, 09-402 Płock
www.kaler.pl; email: info@kaler.pl

